



Matériel médical et technique





Sommaire

1	Règles générale concernant l'utilisation du matériel	4
2	Matériel médical et technique réutilisable	5
3	Liste du matériel jetable	9



1. Règles générale concernant l'utilisation du matériel



Utiliser si possible du matériel à usage unique. Celui-ci est ensuite jeté dans les ordures ménagères de la famille, à moins qu'il ne s'agisse de matériel tranchant ou pointu pouvant provoquer des blessures.



Laver le linge à 60 degrés ou, si ce n'est pas possible, à au moins 30 degrés, avec de la lessive en poudre. Grâce à sa propriété blanchissante, la lessive en poudre élimine mieux les germes que la lessive liquide. Ne pas utiliser de programme court ni de programme d'économie d'eau, et ne pas surcharger la machine à laver.



Se désinfecter les mains avant de sortir quelque chose de la mallette de sage-femme.



Désinfecter tous les appareils médicaux et techniques avec une lingette avant de les remettre dans la mallette.



Les lingettes sont des produits idéaux pour la désinfection par essuyage, avec peu ou pas d'alcool, en général avec la mention «sensible» ou «universel». Elles conviennent à la plupart des matériaux, y compris les appareils techniques (voir également Recommandations d'hygiène, chapitre 6 et la liste du *Verbund angewandter Hygiene*, société allemande d'hygiène appliquée [VAH]).



Se désinfecter les mains après avoir désinfecté le matériel réutilisable et l'avoir remis dans la mallette.



Répartir l'espace en zone blanche (propre) et zone noire (sale).

- Blanc: intérieur de la mallette, rangement propre
- Noir: extérieur de la mallette, environnement de la femme et de la famille



Désinfecter l'extérieur de la mallette à la fin de la journée de travail.



2. Matériel médical et technique réutilisable



Pèse-bébé

Quand

- Après utilisation

Avec quoi

- Désinfectant de surface

Comment — Remarque

- Désinfection par essuyage, laisser sécher à l'air



Bilimètre/Bilichex

Quand

- Après utilisation

Avec quoi

- Désinfectant de surface

Comment — Remarque

- Désinfection par essuyage, laisser sécher à l'air



Tensiomètre

Quand

- Après utilisation

Avec quoi

- Désinfectant de surface

Comment — Remarque

- Désinfection par essuyage, laisser sécher à l'air



2. Matériel médical et technique réutilisable



Ordinateur portable Téléphone

Quand

- Après utilisation

Avec quoi

- Désinfectant de surface

Comment — Remarque

- Désinfection par essuyage, laisser sécher à l'air



Thermomètre médical

Quand

- Après utilisation, même en cas d'emploi d'une housse de protectrice

Avec quoi

- Désinfectant de surface

Comment — Remarque

- Désinfection par essuyage, laisser sécher à l'air



Gants non stériles

Quand

- Re-remplissage

Avec quoi

- Boîte avec couvercle

Comment — Remarque

- Désinfecter chaque fois la boîte avant de la remplir
- Désinfecter aussi les mains avant de la remplir



**Peigne, brosse,
ruban centimétrique,
ustensiles de soins, etc.**

Quand

- Après utilisation
- Seulement si les objets ne sont pas ceux de l'enfant

Avec quoi

- Désinfectant de surface

Comment – Remarque

- Désinfection par essuyage, laisser sécher à l'air



Stéthoscope

Quand

- Après utilisation

Avec quoi

- Désinfectant de surface

Comment – Remarque

- Désinfection par essuyage, laisser sécher à l'air



Alèse

Quand

- Moltex jetable (reste chez la famille)
- Serviette de bain de la famille

Avec quoi

- Jeter l'alèse en cas de salissure
- Changer de serviette en cas salissure

Comment – Remarque

- Jeter avec les ordures ménagères
- Durant la période du suivi, la famille lave elle-même la serviette si une salissure est visible



2. Matériel médical et technique réutilisable



Garrot

Quand

- Après utilisation

Avec quoi

- Désinfectant de surface

Comment — Remarque

- Désinfection par essuyage, laisser sécher à l'air



Sac de pesage

Quand

- Sac personnel de la sage-femme

Avec quoi

- Lavage après chaque changement de famille

Comment — Remarque

- Durant la période du suivi, la famille lave elle-même le sac si une salissure est visible
- Lavage final par la sage-femme selon la norme

Quand

- Sac à usage unique (est remis à la famille et reste chez elle)

Avec quoi

- Aucune mesure

Comment — Remarque

- Nouvelle fonction après le post-partum ou à jeter avec les ordures ménagères

Quand

- Sac de pesage réutilisable

Avec quoi

- Toile enduite, toile cirée

Comment — Remarque

- Désinfection par essuyage, laisser sécher à l'air



3. Liste du matériel jetable



La FSSF tient sur son intranet une liste du matériel à usage unique selon les forfaits de matériel, avec les sources d'approvisionnement.

© 2021 Familystart Zurich et Fédération suisse des sages-femmes (FSSF). Tous droits d'auteur et droits voisins réservés. Ce document est uniquement destiné à un usage interne. Une autorisation écrite spéciale de Familystart Zurich ainsi que de la FSSF est nécessaire pour toute autre utilisation, en particulier pour la diffusion, l'adaptation et la reproduction, pour autant qu'aucun contrat n'existe. Toute infraction est passible de poursuites civiles et pénales.

1^{re} Version

Elaborée le: 16.10.2021

Visa le: 21.10.2021

Par: Jacqueline Morgenstern

Valable jusqu'au: 1.12.2024

FAMILY
START
ZÜRICH

Schweizerischer Hebammenverband
Fédération suisse des sages-femmes
Federazione svizzera delle levatrici
Federaziun svizra da las spendreras



Familystart Zurich
www.familystart-zh.ch



Fédération suisse des sages-femmes
www.sage-femme.ch